
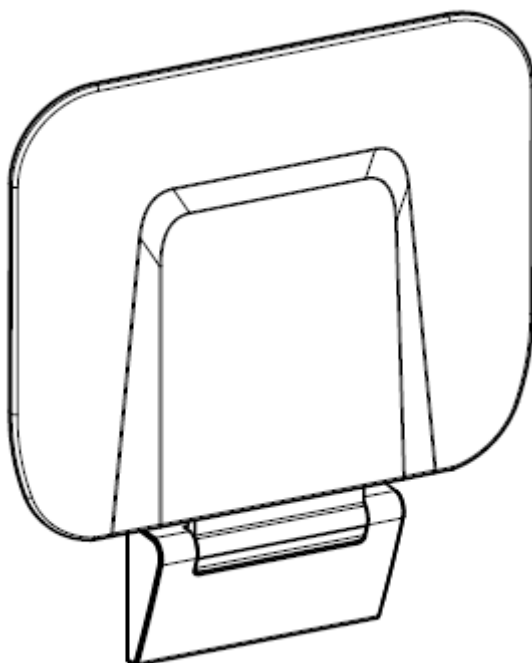


Duschklappsitz DKS + DKS-XL

ERLAU®
EINE MARKE DER RUD GRUPPE

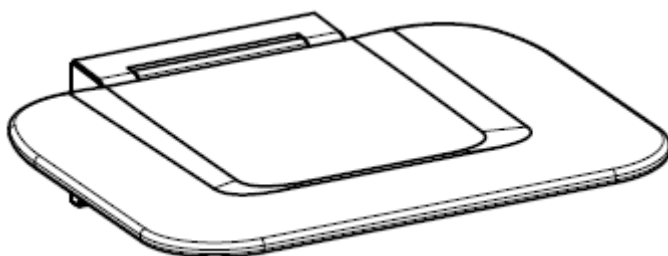


Gebrauchs- und Montageanleitung

CE
2017/745/EU



Anwendungshinweise, Warnhinweise, Installationshinweise, Wartungshinweise, Indikationsangaben	3
Kontraindikationen, Entsorgungshinweise, Pflegehinweise	4

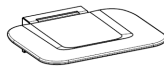

Duschkappsitz DKS + DKS-XL 5581685 / 5581785 / 5585001 / 5585008	5
Einbaumaße / Montagehöhe	5
Befestigungstechnik	6
Einstellung der Klappbremse	7



Anwendungshinweise:

ERLAU Duschklappsitze sind für die Anwendung in geschlossenen Räumen, z.B. Badezimmern, bestimmt. Die Duschklappsitze bieten Sitzgelegenheit für Menschen mit und ohne körperliche Einschränkung.

Warnhinweise:

Der Erlau Duschklappsitz DKS ist für eine maximale statische Gebrauchslast von 185kg bzw. 175kg in der Variante XL ausgelegt. Benutzen Sie den Duschklappsitz nicht wenn Sie dieses Gewicht überschreiten. Beim Überschreiten des Gewichtes können dauerhafte Schäden am Duschklappsitz auftreten. Im Falle einer Gewichtsüberschreitung muss der Duschklappsitz unbedingt vor Weiterverwendung von einem Fachunternehmen geprüft werden.

Die einwandfreie und sichere Funktion der Erlau Duschklappsitze hängt im wesentlichen von der fachgerechten Montage ab. Die Duschklappsitze dürfen aus diesem Grund nur von kundigem Fachpersonal (Sanitärinstallateur) montiert werden. Eine nicht fachgerechte Montage kann zu schwerwiegenden Funktionsbeeinträchtigungen führen. Von einer Selbstmontage ist daher dringend abzuraten.

Verwenden Sie die Erlau Duschklappsitze nur in ihrer vorgesehenen Funktion. Zweckentfremdungen wie z.B. die Verwendung als Aufstiegshilfe oder Klettergerät sind nicht zulässig.

Durch Gewichtsüberschreitung, falsche Montage oder Zweckentfremdung kann es zu Unfällen kommen, die schwere Verletzungen zur Folge haben können.

Die Gewährleistung für Schäden, die aus Überlastung, falscher Montage oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen, ist ausgeschlossen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an die RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG Tel. + 49 7361 504-0.

Installationshinweise:

Bei der Wandmontage von Duschklappsitzen ist die generelle Eignung der Wand sicherzustellen. Diese muss im Bereich der Befestigungen plan (keine vorstehenden Fugen, kein Fliesenversatz) und Tragfähig sein. Verwenden Sie ausschließlich vom Dübelerhersteller, für diesen Zweck zugelassenes Befestigungsmaterial.

Wartungshinweise:

Erlau Duschklappsitze sind nicht wartungsfrei. Die Produkte sind monatlich von qualifiziertem Fachpersonal auf einwandfreie Funktion zu prüfen. Bei Mängeln (z. B. lose Befestigungselemente) sind diese vor der nächsten Benutzung zu beseitigen.

Indikationsangaben:

Erschwerte Nutzung der Dusche durch eingeschränkte Fähigkeit des Stehens, bei Funktionsstörung der unteren Extremität aufgrund eingeschränkter oder vollständig aufgehobener Beweglichkeit der Gelenke und/oder Einschränkung der muskulären Kraft der unteren Extremität und/oder Schädigung der LWS mit Beeinträchtigung der Gelenkbeweglichkeiten bei ausreichender Funktionsfähigkeit der oberen Extremität und ausreichender Rumpfstabilität.



Indikationsangaben, Kontraindikationen, Entsorgungshinweis

Kontraindikationen:

Keine.

Entsorgungshinweise:

Für die Entsorgung von Produkt und Verpackung sind die jeweiligen regionalen und nationalen Vorschriften zu beachten.

Pflegehinweise:

Erlau Produkte verwenden im wesentlichen folgende Oberflächenmaterialien:

- Pulverlacke
- Chrom-Nickel
- Eloxiertes Aluminium
- Kunststoffe

Verwenden sie zur Reinigung der Oberflächen ein sauberes feuchtes Tuch aus Viskose oder Mischgewebe. Sollten Sie auf den Einsatz von Reinigungsmitteln nicht verzichten wollen, so verwenden Sie ausschließlich Reinigungsmittel mit einem PH Wert zwischen 5 und 9. Geeignete Reinigungsmittel verwenden Wirkstoffe wie Phosphate, Seifen oder Tenside. Desinfektionsmittel auf alkoholischer Basis können ebenfalls verwendet werden. Testen Sie im Zweifelsfall das Reinigungsmittel an einer unauffälligen Stelle. Verwenden Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel die z.B. Salzsäure, Essigsäure oder Ameisensäure enthalten. Verwenden Sie keine laugenhaltigen Reinigungsmittel wie Fußbodenreiniger, Industriereiniger oder Reiniger die Natriumhydroxid enthalten. Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Aceton, Nitroverdünnung oder Waschbenzin. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerschwämme oder Scheuerbürsten. Ältere Mikrofasertücher können durch anhaftenden Schmutz und Reinigungsmittelrückstände Kratzer verursachen und sind daher nur bedingt zu empfehlen. Entfernen Sie anhaftende Rückstände von Reinigungsmitteln oder Körperpflegeprodukten frühzeitig. An bereits beschädigten Oberflächen, kann es durch Einwirkung jeglicher Art von Reinigungsmitteln zu einer Erweiterung des Schadens kommen. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Reinigungsmittelherstellers. Geeignete Reinigungsmittel sind z.B. T560 Vario Clean Neutraler Schonreiniger, G481 Blitz Citro Neutraler Alkoholreiniger, D444 Budenat Rapid Schnelldesinfektionsmittel, D447 Budenat LM Neutrales Flächendesinfektionsmittel, P319 Planta San Intense Sanitärunterhaltsreiniger auf Basis von Methansulfonsäure, T464 Bucasan Trendy Sanitärunterhaltsreiniger auf Basis von Amidosulfonsäure oder G454 Bucasan Sanibreeze Sanitärunterhaltsreiniger auf Basis von Zitronensäure. Informationen zur deren Anwendung erhalten Sie von der Firma Buzil (www.buzil.com / Hotline: +49 (0) 8331 930-730).


Eine Gewährleistung für Schäden die aus unsachgemäßer Reinigung hervorgegangen sind ist ausgeschlossen. Bei Rückfragen wenden Sie sich an die RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG Tel. + 49 7361 504-0.

Duschklappsitz DKS + DKS-XL

5581685 / 5581785 / 5585001 / 5585008


CE-Konform nach 2017/745/EU und geprüft nach DIN EN ISO 21856 für eine Gebrauchslast von 185 kg bzw. 175 kg und über eine Lebensdauer von 22.000 Lastwechseln bzw. 6 Jahren.

Einbaumaße

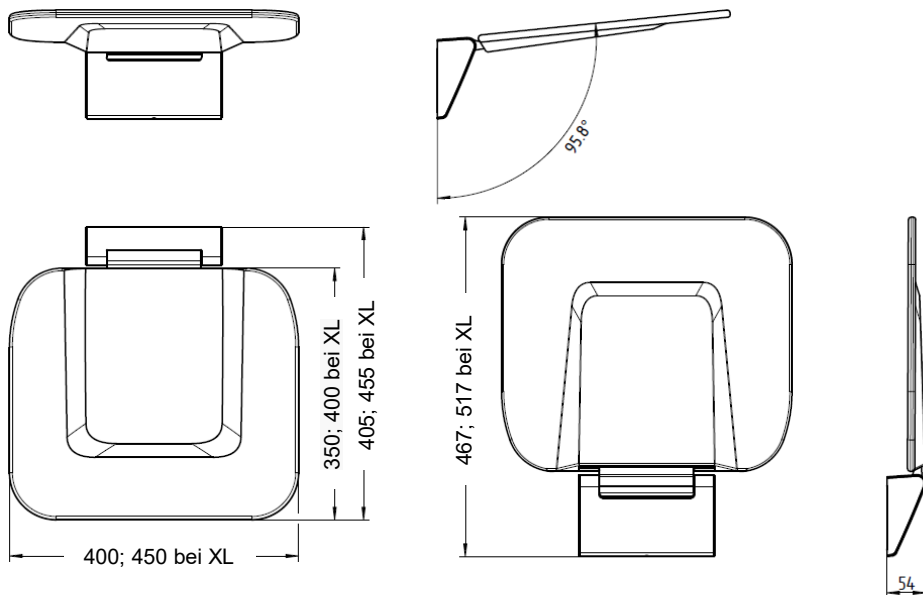


Einbauhöhe

185kg DKS
175kg DKS-XL

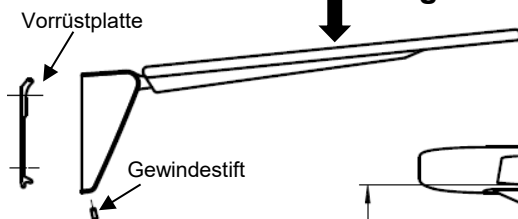


Zur Montage, die Vorrüstplatte lösen, hierzu Gewindestift (SW2) ausdrehen. Nach Verschraubung der Vorrüstplatte den Sitz wieder einhängen und den Gewindestift handfest eindrehen.

Sitzhöhe nach Norm zwischen 460mm und 480mm!
Bohrmaß der oberen Schrauben hierzu zwischen 430mm und 450mm über OKFFB wählen.

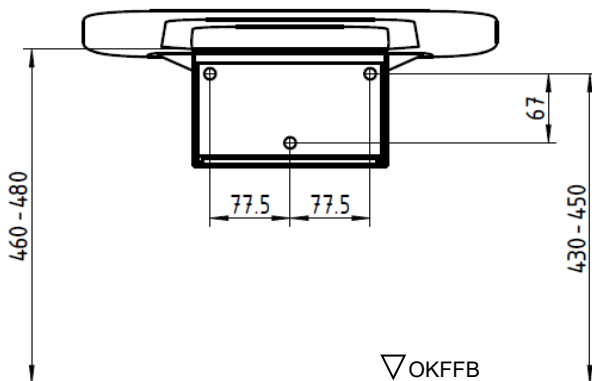

Befestigungstechnik

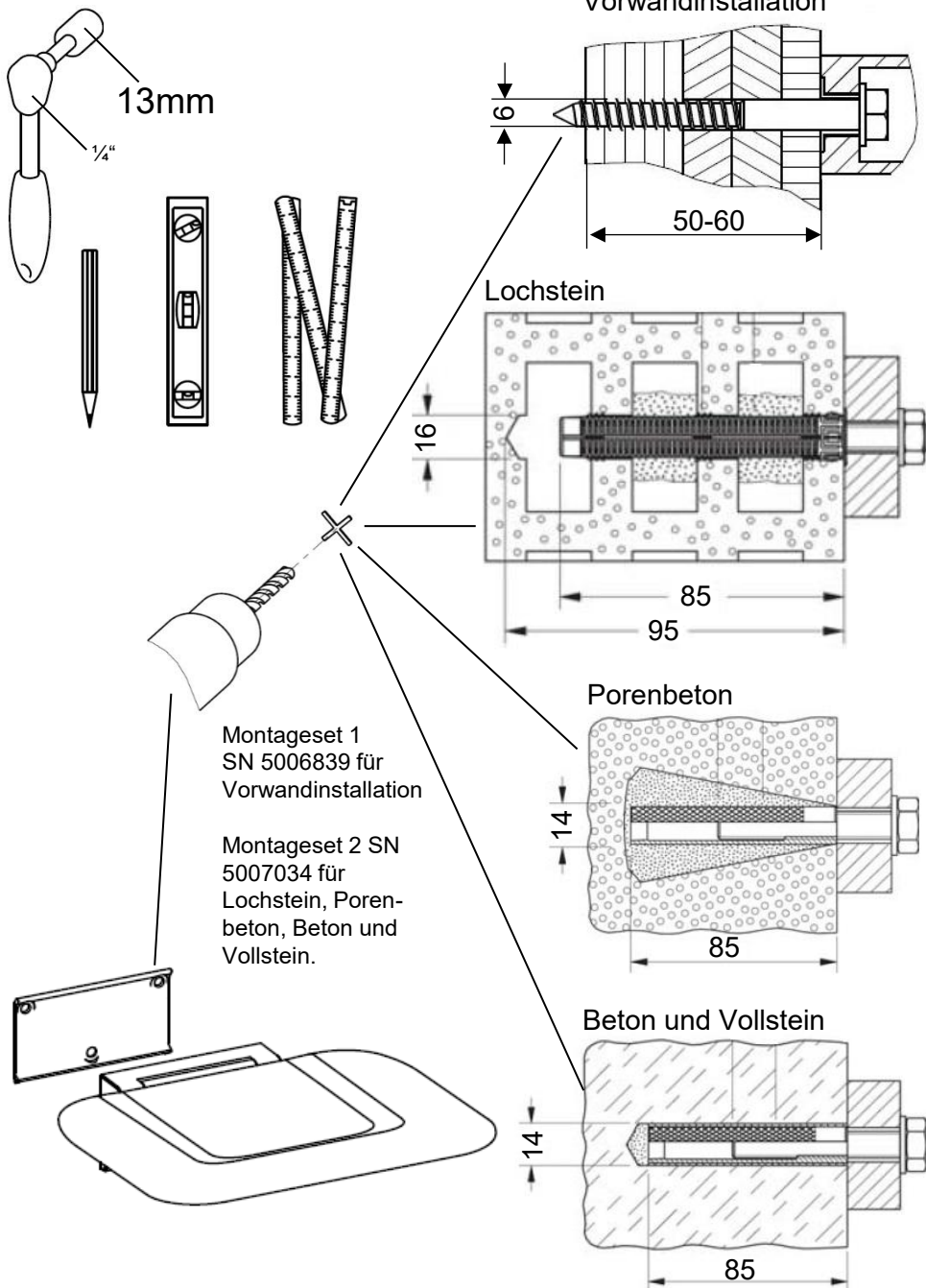

Einstellung der Klappbremse



Zum Einstellen der Klappbremse den Duschklapsitz von der Wand nehmen und die beiden Gewindestifte nachziehen (Inbus SW 3) oder ggf. lockern.



RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG
Friedensinsel
73432 Aalen

Tel. + 49 7361 504-0
Fax + 49 7361 504-3644
objekteinrichtung@erlau.com
www.erlau-objekteinrichtung.de